

CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

HURTIG REFERENCEVEJLEDNING

VIGTIGT!

- Denne test kan bruges inden for de første ti dage, hvor symptomerne på COVID-19 viser sig.
- Denne test er godkendt til hjemmebrug af personer i alderen 12 år eller derover. Prøver fra næseopdninger fra personer under 12 år eller over 70 år skal indsamles af eller under opsyn af voksne.
- Det tager cirka 5 minutter at konfigurere testen, og testresultatet skal læses efter 15 minutter.
- Det er vigtigt, at du følger instruktionerne nøje for at opnå det korrekte resultat.
- Testenheden og bufferopløsningen skal have stuetemperatur (15–30°C), før testen påbegyndes.
- Vask eller rens dine hænder før og efter testen.
- Træf de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du tester andre personer (f.eks. ansigtsmaske, handsker).

Hvis du har spørgsmål om brug af testen eller aflæsning af resultatet, bedes du kontakte kundeservice.


Internet: www.clinitest.siemens-healthineers.com

INTRODUKTION


- Kittets indhold
- Sterile pødepinde (20)
- Testkassetter (20)
- Ekstraktionsrør med buffer og spids (20)
- Arbejdsstation (1)
- Hurtig referencevejledning (1)

NØDVENDIGE MATERIALER, DER IKKE MEDFØLGER

Ur, timer eller stopur samt en plastpose til affald.

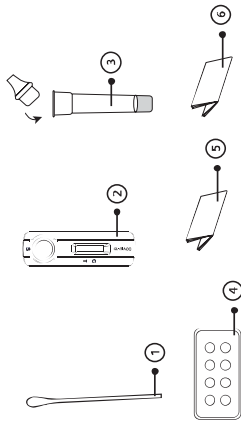

TESTPROCEDURE

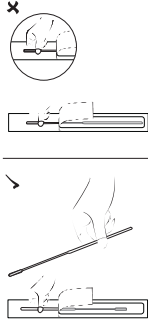

Trin 1.
Sæt røret i arbejdsstationen. Tag låget af røret.




Trin 4.
Rul pødepinden rundt mindst 5 gange mod indersiden af næseboret. Sørg for god kontakt mellem pødepinden og indersiden af næseboret.




Trin 10.
Fjern pødepinden, og kassér den i en plastpose.

Trin 11.
Skub spidsen, som medfølger i sættet, ind i røret, og sørg for, at den slutter tæt til i røret.

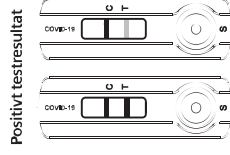

Trin 15.
Allæs dine resultater. Der er tre mulige typer resultater.

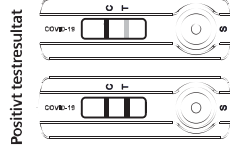

Positivt testresultat

Hvis testenheden ligner et af de positive resultatvinduer som vist til venstre, har du en aktuel COVID-19-infektion. Ring til din læge eller dit lokale sundhedscenter, og sørg for at overholde lokale retningslinjer for sevisitation. En ny test med andre testmetoder, såsom en PCR-test, kan være påkrævet.

SYMBOLOVERSIGT

Se brugsanvisningen	Tests pr. sæt	Autoriseret repræsentant
Kun til in vitro-diagnostisk brug	Anvendes senest	Må ikke genbruges
Opbevares ved 2–30°C	Løsningsnummer	Katalognummer
Producent		



EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Adresse: Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Tyskland
REF GCCOV-502a-H20 (11556331)



Revisionsdato: 23-04-2021
B22149-01
Rev. A